




MESTRA®

ARTICULADOR BALANCEADO LIGERO R-010090

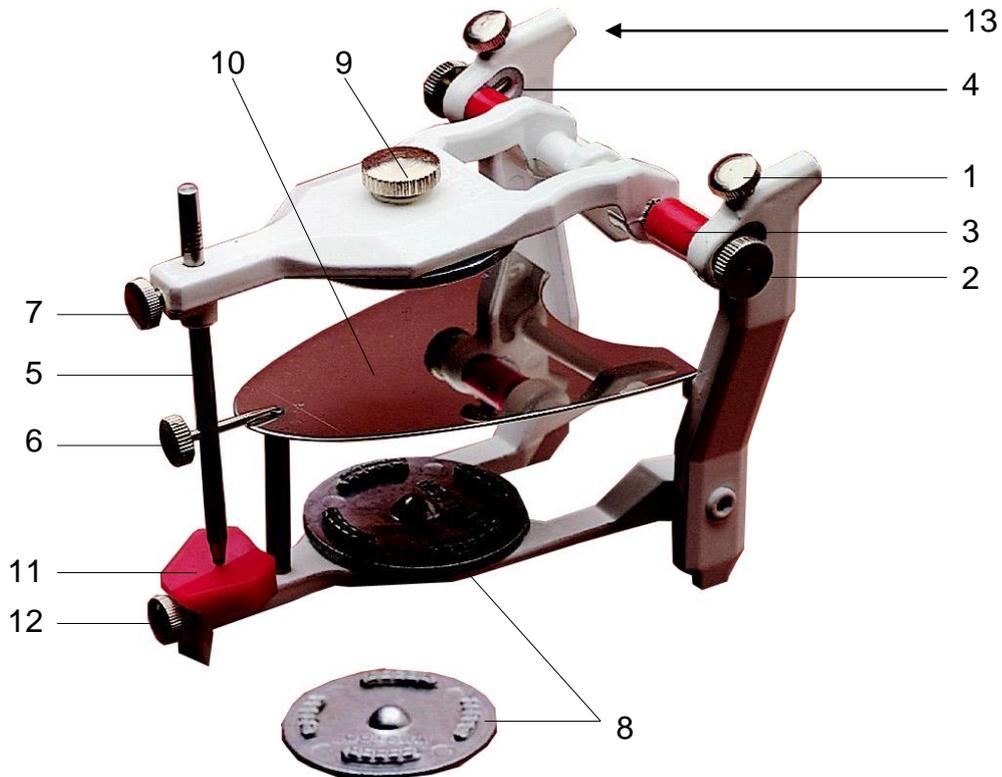

- | | | |
|-----|-----------|--|
| 1. | 010090-01 | Tornillo condilar |
| 2. | 010090-02 | Tornillo prolongación cóndilos |
| 3. | 010090-03 | Cóndilos |
| 4. | 010090-04 | Muelle |
| | 080270-43 | Eje de muelle |
| 5. | 010090-05 | Guía incisal |
| 6. | 010090-06 | Aguja referencia centro de la boca |
| 7. | 010090-01 | Prisionero registro dimensión vertical |
| 8. | 010090-16 | Base aluminio desmontable |
| 9. | 010090-12 | Prisionero base aluminio |
| 10. | 010090-10 | Plano oclusal |
| 11. | 010090-11 | Base plástico |
| 12. | 010090-01 | Prisionero de base |
| 13. | 010090-13 | Espárrago |

ARTICULADOR BALANCEADO LIGERO

R-010090

- El articulador balanceado ligero MESTRA reproduce los movimientos mandibulares en base a unos registros medios obtenidos de los diagnósticos clínicos.
- Los muelles instalados por encima de los cóndilos permiten desplazar al maxilar superior circundicionalmente retornando después a su posición original.
- El articulador MESTRA está equipado con bases de aluminio desmontables que permiten trabajar con varios modelos a la vez y facilitar su encerado.
- Cuando los tornillos condilares están prietos el movimiento queda limitado al de un oclusal convencional.
- La guía incisal tiene unas muescas pintadas en rojo que orientan el paralelismo siendo la central la que deja paralelo al maxilar superior con el plano oclusal.
- El articulador está fabricado con materiales de aleación ligera, lo que le da gran manejabilidad por su escaso peso.