



R-030010

RECIPIENTE A PRESIÓN (PARA RESINAS AUTO-POLIMERIZANTES)

RÉCIPIENT A PRESSIÒN (POUR LES RÉSINES AUTO-POLYMÉRISANTES)

PRESSURE VESSEL (FOR SELF-POLYMERIZING RESINS)



Permite efectuar con las resinas auto-polimerizantes reparaciones y adiciones mejorando la calidad del trabajo.

Elimina porosidades y atenúa cambio de color en las prótesis tratadas.

Modo de empleo:

- Coloque el recipiente en la prensa.
- Introduzca la prótesis a tratar, añadiendo agua templada hasta rebosar, poniendo a continuación la tapa, de forma que se evite toda cámara de aire entre ésta y el agua.
- Accione la prensa hasta que el manómetro del recipiente alcance una presión de 3 a 5 kg/cm², dejándolo polimerizar el tiempo necesario para cada tipo de resina.



It allows repair and addition operations by using self-polymerizing resins improving work quality.

It removes porosity and reduces colour changes in treated dentures.

Instructions for use:

- Put the vessel on the press.
 - Place the denture to be treated, adding lukewarm water up to briming over. Then put the lid so as to avoid any air chamber between this and water.
 - Activate the press till the vessel pressure gauge reaches a pressure from 3 to 5 kg/cm², leaving it polymerizing the necessary time for each kind of resine.
-



Pour les réparations et les rebasages avec de la résine auto-polymérisante. Avec ce récipient on obtient un travail de meilleure qualité.

Il élimine les porosités et atténue le changement de couleur des prothèses traitées.

Mode d'emploi:

- Placer le récipient sous presse.
- Introduire la prothèse à traiter et verser de l'eau tiède jusqu'à recouvrir la pièce. Sans attendre, placer le couvercle de manière à éviter la formation d'une poche d'air entre celui-ci et l'eau.
- Actionner la presse jusqu'à ce que le manomètre du récipient atteigne une pression de 3 à 5 kg/cm² en laissant la résine polymériser pendant le temps requis par le fabricant.



MESTRA[®]

TALLERES MESTRAITUA S.L.

Txori-Erri Etorbidea, 60

Tfno. + 34 94 453 03 88 Fax + 34 94 471 17 25

E-mail: mestra@mestra.es - www.mestra.es

48150 SONDIKA - BILBAO - ESPAÑA