



## R-080090 / R-080100

E .....	ESTERILIZADOR DE BOLAS DE VIDRIO.....	3
GB .....	GLASS BALL STERILISER.....	5



**MESTRA®**

TALLERES MESTRAITUA S.L.


Txori-Erri Etorbidea, 60

Tfno. + 34 94 453 03 88 Fax + 34 94 471 17 25

E-mail: [mestra@mestra.es](mailto:mestra@mestra.es) - [www.mestra.es](http://www.mestra.es)

48150 SONDIKA - BILBAO - ESPAÑA

Rev. 18/10/05

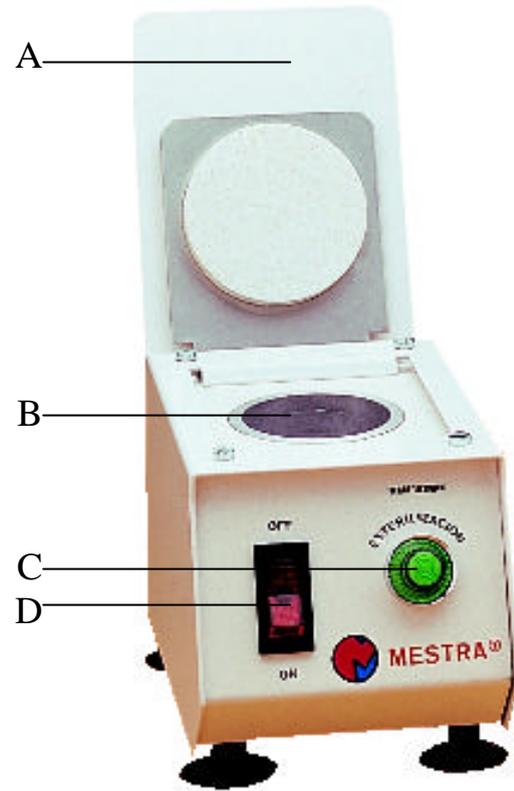

A	Tapa / <b>Cover</b>
B	Cubeta / <b>Bowl</b>
C	Luz verde / <b>Green lamp</b>
D	Interruptor / <b>Switch</b>



**PRECAUCIONES**

- ◆ Asegúrese que la tensión de conexión a la red es la adecuada (230 V, 50/60 Hz, con toma de tierra).
- ◆ No utilice el aparato en locales especialmente húmedos o cerca de materiales inflamables (alcohol, disolventes, etc.).
- ◆ No introduzca en la cubeta objetos de plástico, o cualquier otro material fusible a bajas temperaturas.
- ◆ Mantenga siempre cerrada la tapa cuando el aparato no se encuentre esterilizando algún instrumento.
- ◆ Después de desconectar el interruptor, espere al menos 30 minutos antes de tocar la cubeta o las bolas de vidrio. La luz verde apagada no tiene por que ser indicativo de que el aparato se encuentra a temperatura ambiente.
- ◆ Evite que los niños o personal no especializado manipulen el aparato.
- ◆ Evite derramar las bolas de vidrio cuando retire algún instrumento de la cubeta. La temperatura de las mismas puede producir quemaduras de importancia.
- ◆ Después de esterilizar algún útil quirúrgico, y antes de su empleo con el paciente, asegúrese que el útil ha alcanzado la temperatura ambiente.
- ◆ Evite traccionar, torsionar o plegar en exceso el cable de conexión a la red.
- ◆ Antes de limpiar el aparato, asegúrese que se encuentra desconectado de la red.
- ◆ En caso de sustitución, emplee cables termorresistentes de 3 x 1.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

	<b>R-080090</b>	<b>R-080100</b>
Alto:	105 mm	130 mm
Largo:	150 mm	160 mm
Ancho:	90 mm	90 mm
Peso:	1,4 kg	1,5 kg
Recipiente:	Ø 45   43	Ø 50   70



- ◆ Do not allow children or unskilled personnel to handle the unit.
- ◆ Do not spill the glass balls when taking instruments out of the bowl: they are very hot and can cause burns.
- ◆ Allow sterilised instruments to cool to room temperature before using them on patients.
- ◆ Do not pull, twist or bend the mains power cable too far.
- ◆ Always ensure that the unit is unplugged before cleaning it.
- ◆ When replacing cables, always use 3 x 1 heat-resistant cables.

### TECHNICAL CHARACTERISTICS

	R-080090	R-080100
Height:	105 mm	130 mm
Length:	150 mm	160 mm
Width:	90 mm	90 mm
Weight:	1.4 kg	1.5 kg
Container:	∅ 45   43	∅ 50   70





**MESTRA<sup>®</sup>**

**TALLERES MESTRAITUA S.L.**

Txori-Erri Etorbidea, 60

Tfno. + 34 94 453 03 88 Fax + 34 94 471 17 25

E-mail: [mestra@mestra.es](mailto:mestra@mestra.es) - [www.mestra.es](http://www.mestra.es)

**48150 SONDIKA - BILBAO - ESPAÑA**