




Ref. 080216

ECLIPSE

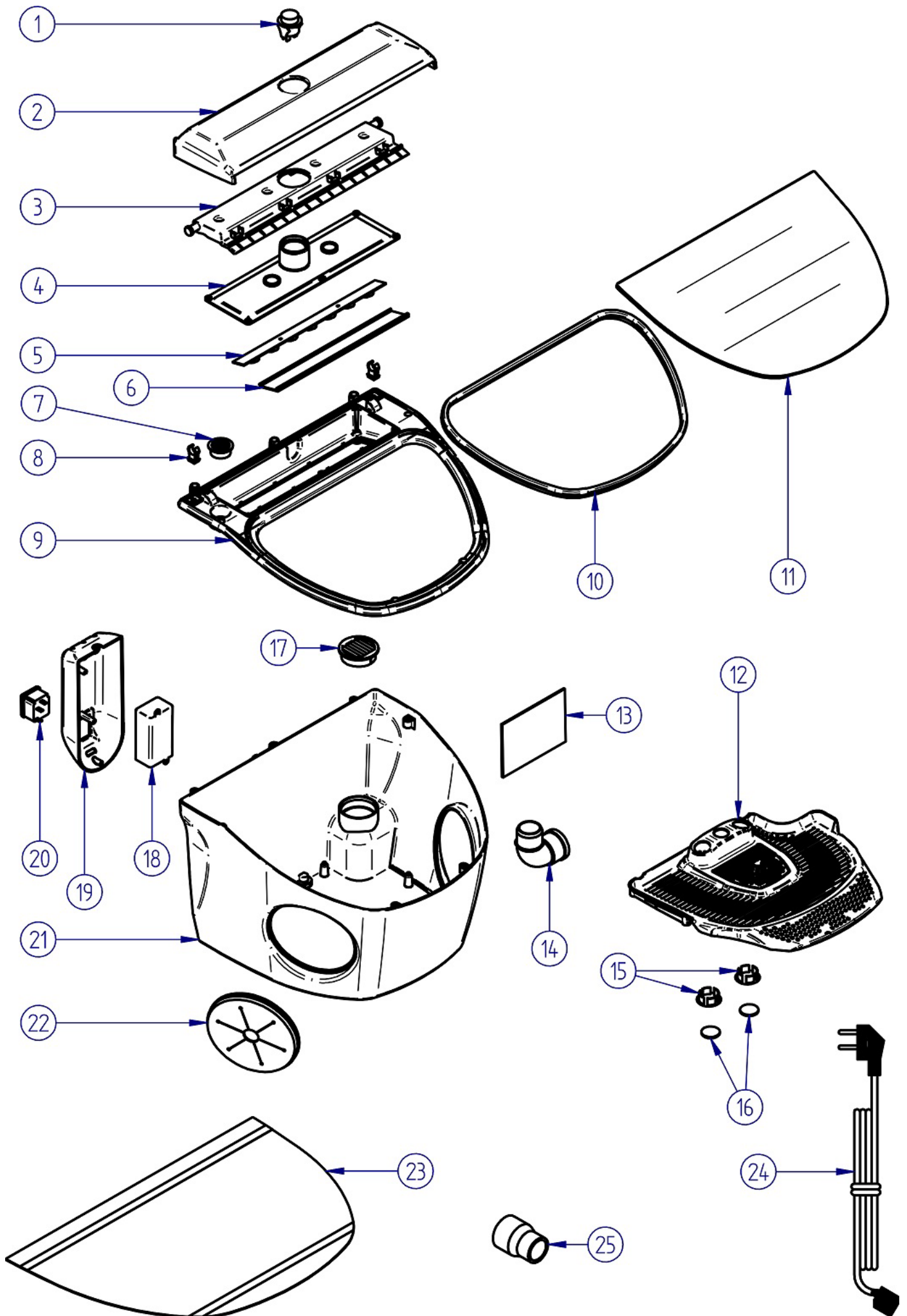

Nº	Ref.	Descripción	Description
1	080233-02	Interruptor	Switch
2	080214-01B	Tapa superior	Upper cover
3	080214-01C	Soporte cristal	Glass support
4	080214-01D	Soporte interruptor	Switch support
5	080214-04	Barra de LED	LED bar
6	080214-05	Difusor	Diffuser
7	080214-07	Rejilla ventilación - pequeña	Ventilation grill - small
8	080253-02	Bisagra	Hinge
9	080214-01E	Marco cristal	Glass frame
10	080093-10	Burlete de goma	Rubber strip
11	080214-02	Cristal	Glass
12	080220-02	Bandeja	Tray
13		Sufridera de goma	Rubber square
14	080508-07	Codo aspiración	Suction elbow
15		Tapón bandeja	Tray plug
16		Disco goma bandeja	Tray rubber disc
17	080220-10	Rejilla ventilación - grande	Ventilation grill - large
18	080614-20	Fuente de alimentación	Power source
19	080216-02	Cubierta fuente alimentación	Power source cover
20	080490-06	Base de conexión	Connection base
	000230	Fusible 2A	Fuse 2A
21	080216-01	Cuerpo principal	Main body
22	080216-03	Manguito de goma	Rubber sleeve
23	080220-12	Plástico protector cristal (10 U.)	Glass plastic protector (10 units)
24	000250	Cable 230 V	Cable 230 V
	000252	Cable 115 V	Cable 115 V
25*	080214-15	Adaptador aspiración Gemini	Gemini suction unit adaptor

* Accesorio/ Accessory



A	Cristal / Glass
B	Bandeja / Tray
C	Interruptor / Switch
D	Manguito de goma / Rubber sleeve
E	Conexión aspiración exterior / External suction connection

La caja de repaso “Eclipse” está especialmente diseñada para el repasado de pequeñas piezas pertenecientes al sector de la prótesis dental. Para conseguir unas óptimas prestaciones y rendimiento del producto, le recomendamos que lea detenidamente las siguientes instrucciones:

Instalación

- Desembale cuidadosamente el aparato.
- Elija para el emplazamiento del aparato una superficie rígida, plana, alejada de fuentes de vibraciones o de calor. Sitúe el aparato a una altura que le permita manipular con comodidad los objetos en el interior de la cabina.
- Conecte el enchufe eléctrico a una toma de corriente de 115/230 V, 50/60 Hz provista de toma de tierra.
- La cabina debe emplearse siempre conectada a una aspiración forzada. Para ello, dispone de un tubo de salida situado en la parte trasera (E). La aspiración que utilice tiene que ser capaz de provocar la circulación suave y continuada hacia el tubo de salida de las partículas de polvo que se generen.

Uso de aparato

Para trabajar en buenas condiciones le recomendamos:

1. Abra la tapa de la cabina e introduzca la pieza que desea manipular en su interior. También es posible introducir las piezas a través de las aberturas laterales.
2. Trabaje siempre con la tapa de cristal cerrada.
3. Protéjase adecuadamente: utilice gafas protectoras, guantes y mascarilla.
4. Ponga en marcha la aspiración forzada. Para una mejor visión de la pieza encienda la luz del interior de la cabina accionando el interruptor (C).

Mantenimiento y limpieza

Para garantizar una larga vida del aparato, le recomendamos:

- Utilice un plástico protector para el cristal.
- Periódicamente retire el polvo del interior de la cabina. Para ello puede retirar la bandeja interior (B).
- Para realizar la limpieza general del aparato, basta con utilizar un paño suave.

Precauciones

- Trabaje siempre con la tapa de la cabina cerrada, y con las protecciones adecuadas.
- Trabaje siempre con aspiración forzada.
- Evite que los niños o personal no cualificado manipulen el aparato.
- Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente de 115/230 V, 50/60 Hz provista de toma de tierra.

Características técnicas

Alto:.....	275 mm
Ancho:	360 mm
Fondo:.....	330 mm
Peso:	2,8 kg
Tensión:.....	115/230 V, 50/60 Hz
Consumo:.....	7 W

Declaración de conformidad UE

La empresa **Talleres Mestraitua S.L.**
con domicilio social: Txori-erri Etorbidea, 60
48150 Sondika - Bilbao - España


por la presente declara que el producto

Cabina de repaso “Eclipse” Ref. 080216

cumple con los requisitos de las siguientes directivas:

2014/35/UE (baja tensión)

2014/30/UE (compatibilidad electromagnética)

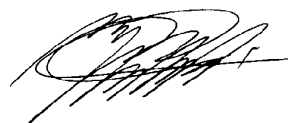

Ignacio Mestraitua
Director Gerente
Sondika, 06.04.2022

The "Eclipse" finishing is specially designed for the reworking of small parts in the dental prosthesis sector. To achieve optimal performance and product performance, we recommend that you carefully read the following instructions:

Installation

- Carefully unpack the unit.
- Choose a rigid, flat surface, away from sources of vibration or heat, for the location of the unit. Place the unit at a height that allows you to comfortably handle objects inside the chamber.
- Connect the electrical plug to a 115/230 V, 50/60 Hz power supply with an earth connection.
- The chamber must always be connected to a forced suction. To do this, it has an outlet tube located in the back (E). The suction must be able to cause the smooth and continuous circulation of the generated dust particles to the outlet pipe.

Operation

To work in good conditions, we recommend:

1. Open the cab lid and insert the part you want to manipulate inside. It is also possible to insert the pieces through the side openings.
2. Always work with the glass lid closed.
3. Protect yourself properly: wear protective goggles, gloves and a mask.
4. Start the forced suction. For a better view of the piece turn on the light inside the chamber by operating the switch (C).

Maintenance and cleaning

To guarantee a long life of the unit, we recommend:

- Use the glass plastic protector.
- Periodically remove the powder from inside the chamber. For this, you can remove the tray (B).
- To clean the unit, simply use a soft cloth.

Precautionary measures

- Always work with the lid closed, and with the appropriate protections.
- Always work with forced aspiration.
- Avoid children or unqualified personnel handling the device.
- Connect the power cord to a 115/230 V, 50/60 Hz power supply with a ground connection.

Technical characteristics

Height:275 mm
Width:360 mm
Length:330 mm
Weight:2.8 kg
Power supply: 115/230 V, 50/60 Hz
Consumption: 7 W

Declaration of conformity UE

The firm **Talleres Mestraitua S.L.**
with social address: Txori-erri Etorbidea, 60
48150 Sondika - Bilbao - Spain

Hereby declares that the product

Finishing box "Eclipse" Ref. 080216

Meets the requirements set out in the following directives:

2014/35/UE (low tension)
2014/30/UE (electro magnetic compatibility)



Ignacio Mestraitua
Managing Director
Sondika, 2022-04-06



MESTRA[®]

Your trusted brand

Talleres Mestraitua S.L.

Txori-erri Etorbidea, 60
T: (+34)944530388 - F: (+34)944711725
mestra@mestra.es - www.mestra.es
48150 SONDIKA - BILBAO - ESPAÑA