


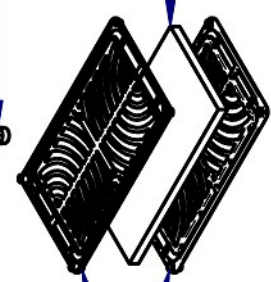
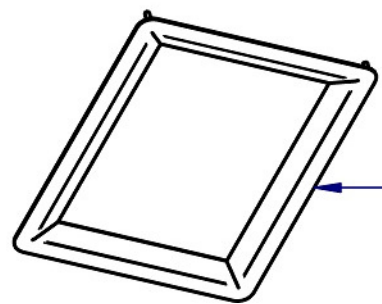
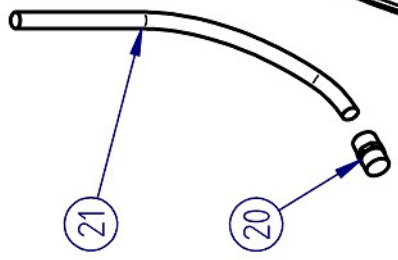
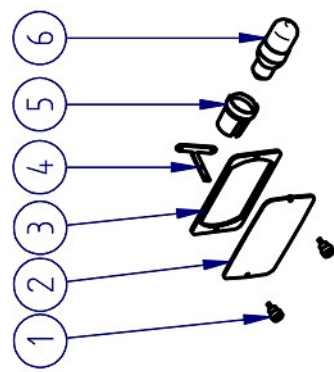
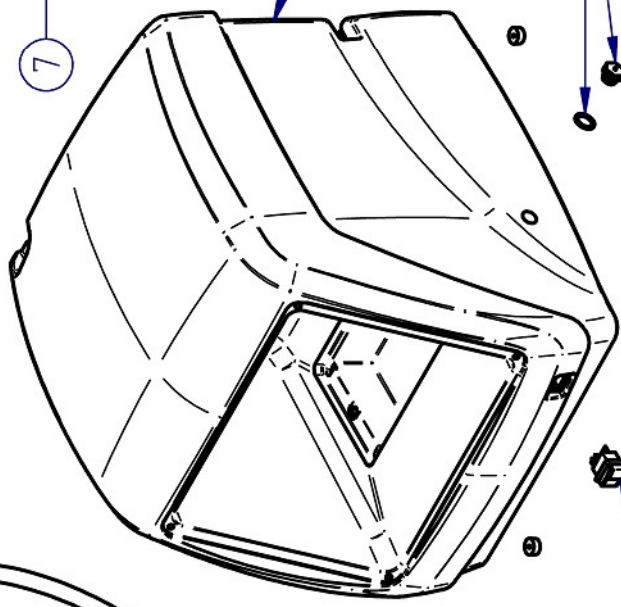


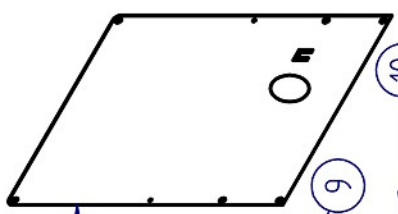

R-080602

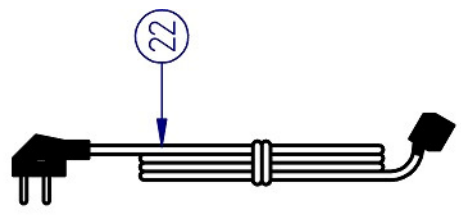

Nº	Ref.	CONCEPTO	DESCRIPTION
1	080600-28	Pomo pantalla	Shield knob
2	080600-02	Pantalla lámpara	Lamp shield
3	080600-07	Junta pantalla	Shiels gasket
4	080600-16	Soporte portalámparas	Lamp holder support
5	080600-13	Portalámparas	Lamp holder
6	080600-05	Lámpara 230V	Lamp 230V
	080600-05B	Lámpara 115V	Lamp 115V
7	080602-01	Chapa trasera	Back sheet
8	080084-01	Base Schuko	Schuko plug base
9	080600-08	Carcasa	Housing
10	080600-17	Soporte base porta fusibles	Fuse holder base support
11	080490-06	Base porta fusibles	Fuse holder base
12	080600-01	Visor	Visor
13	080490-31	Pata	Leg
14	080600-22	Filtro estropajo	Cloth filter
15	080600-12	Conjunto filtros metálicos	Metal filter kit
16	080600-40	Rejilla inferior cámara	Chamber lower grid
17	080600-39	Rejillas superiores de cámara	Chamber top grids
18	080400-07	Interruptor	Switch
19	080600-09	Marco frontal	Front frame
20	080086-07	Manguito inferior de manguera	Lower hose sleeve
21	080600-04	Manguera de desagüe	Hose
22	000250	Cable 230V	Cable 230V
	000252	Cable 115V	Cable 115V

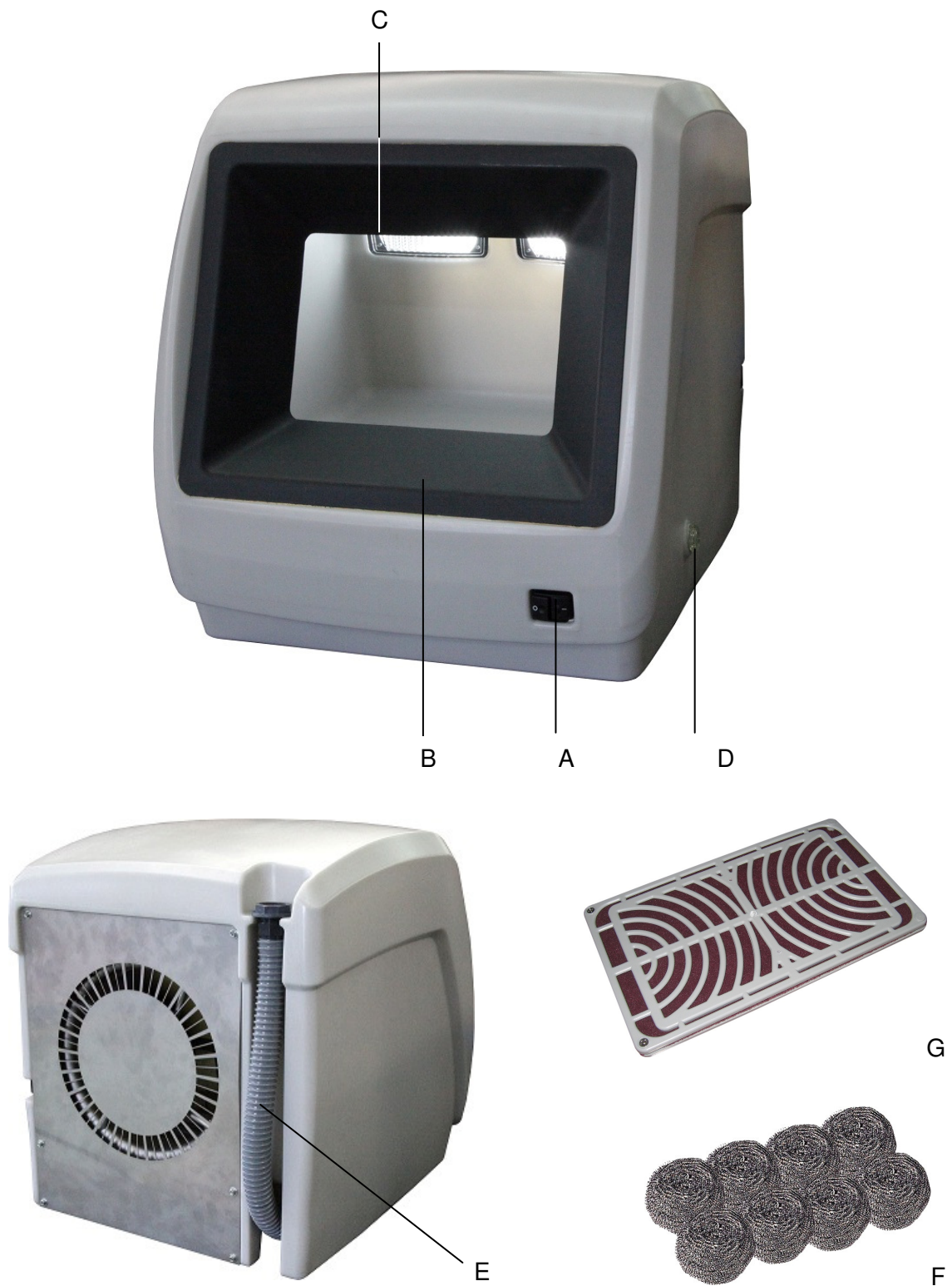

- | | |
|----|--------------------------|
| A. | Interruptor general |
| B. | Marco frontal |
| C. | Luz |
| D. | Visor nivel de agua |
| E. | Manguera para aspiración |
| F. | Filtro metálico |
| G. | Filtro de tela |

El box R-080602 cuenta con una amplia cámara de trabajo perfectamente iluminada y un sistema de aspiración no integrado para la evacuación de los gases. Fabricado en plástico de alta calidad, su limpieza resulta muy cómoda y sencilla.

NOTA: Lea con atención este manual. Contiene importante información sobre seguridad en la instalación, uso y mantenimiento. Si el equipo se utiliza de una manera no indicada por el fabricante, la seguridad proporcionada por el equipo puede verse comprometida.

Significado de los símbolos utilizados sobre la máquina



Peligro. Existe peligro de lesiones.



Leer completamente estas instrucciones antes de poner el aparato en funcionamiento.



Riesgo de choque eléctrico.

Instalación

Condiciones ambientales:

- Usar únicamente en espacios interiores.
- Tª ambiente: 5-40 °C [41-104 °F]
- Humedad relativa máxima: 0-95 %
- Grado de protección: IP20

1. Desembale cuidadosamente el box y compruebe que no ha sufrido daños durante el transporte.

IMPORTANTE: No agarre el box por el marco frontal (B). Debido al peso de la máquina, el marco podría despegarse. Para mover el box, levántelo por los laterales.



2. Elija para el emplazamiento del aparato una base horizontal, plana y rígida, alejada de fuentes de calor o vibraciones.
3. Posicione el equipo de modo que sea fácil maniobrar el dispositivo de desconexión (interruptor general).
4. Conecte la manguera trasera del aparato a un sistema de aspiración.



5. Puede conectar la alimentación eléctrica de su sistema de aspiración a la toma de corriente situada en la parte trasera del box.
6. Conecte el aparato a una toma de corriente de 230 V, 50/60 Hz provista de tierra.


Funcionamiento

1. Encienda el interruptor general situado al frente del aparato.
2. Se encenderán las dos luces de la cámara.

Mantenimiento y limpieza

Para asegurar una óptima fiabilidad y una larga vida del aparato, le recomendamos:

- Limpie regularmente los filtros situados en el suelo de la cámara (G y F). Para ello retire la rejilla (Fig. 1) y limpie mediante chorro de vapor.

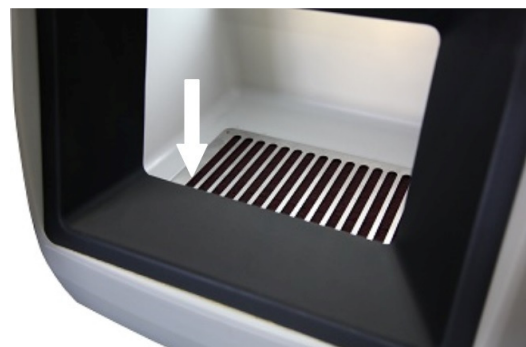

IMPORTANTE: Realice esta operación fuera del box, ya que al funcionar sin los filtros colocados podría dañar su sistema de aspiración.

Cuando sea necesario sustituya los filtros usados por unos nuevos. Para garantizar el buen funcionamiento del aparato, utilice recambios originales **MESTRA**.

- Cuando note que la aspiración ha perdido eficacia, compruebe la limpieza de los filtros.
- La limpieza de la carcasa exterior del aparato deberá hacerse con un paño humedecido en agua jabonosa. No utilice disolventes o cualquier otro producto inflamable.
- Utilice sólo recambios originales suministrados por el fabricante.
- Para cambiar las lámparas, desenrosque los pomos de sujeción.



Precauciones

- Antes de conectar el aparato a la red, asegúrese que la tensión de alimentación es la adecuada (230 V, 50/60 Hz con toma de tierra).
- El cable sólo puede ser sustituido por uno de iguales características al suministrado por el fabricante.
- Atención: antes de encender la máquina, lea completamente estas instrucciones.
- Guarde estas instrucciones para su consulta en el futuro.
- No utilice el aparato con una finalidad diferente de la especificada en estas instrucciones.
- No toque el aparato ni el cable con las manos húmedas.
- Antes de cada uso, compruebe que el nivel de agua no alcanza la altura del visor (D).
- No llene de agua la cámara de la máquina, ni deje una manguera abierta en ella.
- Desenchufe el aparato en caso de tormenta y cuando no lo use durante un largo tiempo.
- Evite traccionar, torsionar o plegar en exceso el cable de conexión a la red.
- Desenchufe el aparato antes de limpiarlo, no moje las partes eléctricas, no use productos químicos.

- No agarre el box por el marco frontal. Debido al peso de la máquina, el marco podría despegarse. Para mover el box, levántelo utilizando el asa con la que lo recibe.
- Retire cualquier resto de suciedad o de agua de la conexión del cable.
- Desenchufe el aparato inmediatamente si detecta ruido, olor o humo.
- Instale el producto alejado de fuentes de calor.
- No utilice el aparato cerca de materiales inflamables (alcohol, disolventes, etc.).
- Sea cuidadoso con la máquina para prevenir accidentes.
- Mantenga siempre el aparato apagado cuando no lo utilice.
- Evite que los niños o personal no especializado manipulen el aparato.
- No desmonte, repare ni modifique el aparato.
- En caso de que haya algún componente defectuoso u otro tipo de problema, no utilice el aparato ni intente arreglarlo por su cuenta.
- Contacte con su distribuidor para preguntas o información detallada sobre resolución de problemas.

Características técnicas

Alto:570 mm
Ancho:.....520 mm
Fondo:.....490 mm
Peso:.....20 kg
Tensión: 230 V, 50/60 Hz

Declaración de conformidad UE

La empresa **Talleres Mestraitua S.L.**
con domicilio social: Txori-erri Etorbidea, 60
48150 Sondika - Bilbao - España

por la presente declara que el producto

Box para la aplicación de spray 080602

cumple con los requisitos de las siguientes directivas:

2014/35/UE (baja tensión)

2014/30/UE (compatibilidad electromagnética)

2006/42/CE (seguridad en máquinas)

Ignacio Mestraitua
Director Gerente
Sondika, 07.06.2016



MESTRA®

Your trusted brand

Talleres Mestraitua S.L.

Txori-erri Etorbidea, 60

T: (+34)944530388 - F: (+34)944711725

mestra@mestra.es - www.mestra.es

48150 SONDIKA - BILBAO - ESPAÑA