




Ref. 100030

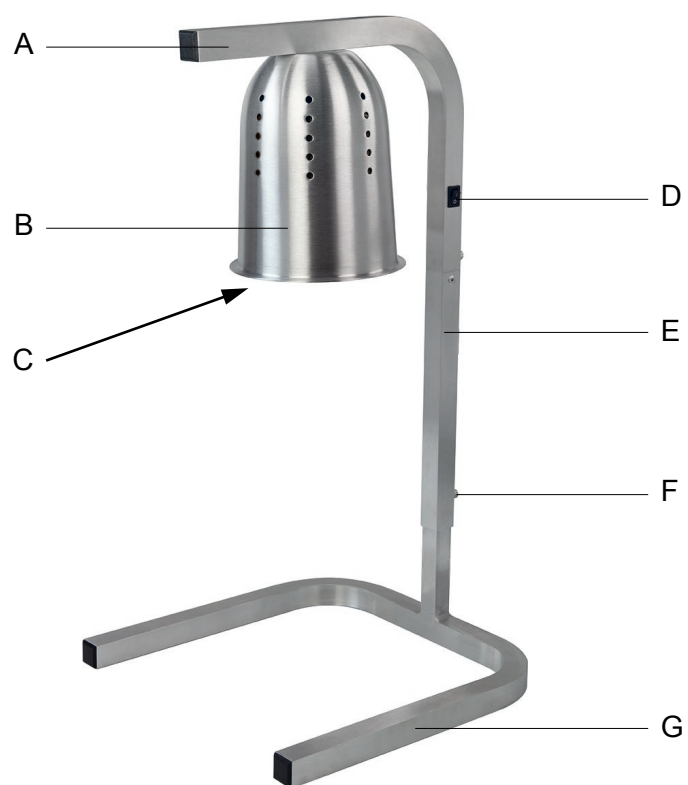

A	Soporte superior lámpara
B	Lámpara
C	Bombilla
D	Interruptor ON/OFF
E	Tubo suplemento altura
F	Tornillo fijación
G	Soporte "U" inferior

NOTA: Lea con atención este manual. Contiene importante información sobre seguridad en la instalación, uso y mantenimiento. Si el equipo se utiliza de una manera no indicada por el fabricante, la seguridad proporcionada por el equipo puede verse comprometida.

La Ref. 100030 es una lámpara que emite radiación térmica infrarroja para secar el líquido colorante de las piezas de zirconia antes de la sinterización.

Instalación

1. Desembale cuidadosamente la pulidora. Compruebe que no ha sufrido ningún deterioro durante el transporte.
2. Retire todo el material de embalaje y la cubierta protectora de la unidad y sus piezas. No se deshaga del envoltorio hasta comprobar que el funcionamiento es correcto.
3. Asegúrese de retirar las protecciones de las lámparas antes del primer uso.
4. Coloque el soporte en "U" inferior sobre la mesa de trabajo.
5. Extraiga el tornillo de fijación e introduzca el tubo suplemento altura, puede seleccionar la altura de la lámpara (23-35-40-45-50 cm desde la mesa de trabajo).
6. Extraiga el otro tornillo de fijación e introduzca el soporte superior de la lámpara en su alojamiento. Amarre firmemente con el tornillo.
7. Coloque la unidad en una base a la altura adecuada, en una zona conveniente para su uso.
8. Se debe evaluar en su ubicación que la lámpara no se caiga accidentalmente y sea lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de la unidad.
9. Para un funcionamiento adecuado y seguro, la lámpara debe estar colocada a una distancia razonable de las paredes y materiales inflamables. Deje un espacio libre de al menos 30 cm por los laterales para propiciar un funcionamiento correcto y seguro. No coloque la lámpara en un área sin ventilación.
10. No coloque nada encima de la lámpara; podría dañarlo o causar posibles lesiones personales.
11. La lámpara no es impermeable. Para un funcionamiento seguro y adecuado coloque la unidad en el interior donde la temperatura ambiente sea de al menos 21 °C (70 °F) y como máximo 29 °C (85 °F).
12. No coloque la lámpara en un área expuesta a temperaturas excesivas. Una temperatura excesiva puede causar daños en la lámpara.
13. Conecte el aparato a una toma de corriente de 230 V, 50/60 Hz dotada de toma de tierra.

Funcionamiento

Para un correcto empleo del aparato, le recomendamos que se ajuste a las siguientes instrucciones:

ATENCIÓN: Asegúrese de retirar el protector de cartón situado en la lámpara.

- Conecte el enchufe a su corriente.
- Pulse el interruptor ON/OFF, la luz se encenderá. En breves instantes notará el efecto del calentamiento de la lámpara.
- Sitúe las piezas a secar bajo la luz de la lámpara.
- Si considera que la temperatura es excesiva, eleve las lámparas (hasta 53 cm), si por el contrario es insuficiente, acérquelas lo máximo posible (hasta 39 cm).
- Apague la lámpara cuando no la use.

Mantenimiento y limpieza

Para asegurar un funcionamiento correcto, fiable y duradero del aparato, le recomendamos:

- Siempre apague y desenchufe la lámpara antes de la limpieza. Espere hasta que el interior no esté caliente.
- Nunca emplee productos químicos o abrasivos. No emplee un cepillo u otro utensilio que pudiera dañar las diferentes partes y superficies.
- Use un paño húmedo con detergente para la limpieza y después séquela. Asegúrese de limpiar la máquina todos los días.
- **ATENCIÓN:** No coloque la máquina directamente en un contenedor con agua.
- La lámpara no es sumergible.

Precauciones

- Antes de conectar el aparato a la red, asegúrese de que la tensión de alimentación es la adecuada (230 V, 50/60 Hz).
- Algunas superficies exteriores de la unidad se calentarán. Utilice guantes de protección cuando manipule piezas calientes.
- No permita que los niños o personal no especializado manipulen el aparato.
- No utilice el aparato cerca de disolventes, alcohol u otros materiales inflamables.
- Antes de la utilización del aparato, asegúrese que éste se encuentra asentado sobre una base firme y sólida.
- Mantenga limpia y ordenada el área de trabajo para prevenir accidentes.
- Para evitar posibles descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe, ni el aparato en agua ni en nin-

gún otro líquido. No introduzca destornilladores ni elementos metálicos en el interior del aparato.

- NO use el aparato si el lugar de trabajo está húmedo o mojado o si debe trabajar sobre la lluvia. Si usa un aparato electrónico con las manos mojadas o parado en el agua, puede sufrir una descarga eléctrica.
- Si el cable de suministro está dañado, este deberá ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico u otra persona autorizada por el fabricante. En caso de manipulación del mismo por personal no autorizado, la garantía dejará de tener validez con efecto inmediato.
- No deje que el cable cuelgue de la mesa o la encimera, ni que entre en contacto con superficies calientes.
- No utilice el aparato si está dañado.
- Utilice este aparato sólo para el uso para el que ha sido concebido tal y como se describe en este manual. No utilice elementos accesorios sin la recomendación del fabricante.
- **DESHACERSE DEL APARATO:** No se deshaga de este aparato como basura municipal no clasificada. Debido al uso de elementos eléctricos y electrónicos es necesaria la recogida selectiva del mismo, tal y como ordena el RD 208/2005 de recogida selectiva de productos eléctricos.

Características técnicas

Tensión de alimentación:220-240 V, 50 Hz
Potencia:275 W
Dimensiones:34 x 33 x 56~71 cm
Peso:.....1,150 kg

Declaración de conformidad UE

La empresa **Talleres Mestraitua S.L.**
con domicilio social: Txori-erri Etorbidea, 60
48150 Sondika - Bilbao - España

por la presente declara que el producto

Lámpara para secado de circonio por infrarrojos
Ref. 100030

cumple con los requisitos de las siguientes directivas:

2014/35/UE (baja tensión)

2014/30/UE (compatibilidad electromagnética)



Ignacio Mestraitua
Director Gerente
Sondika, 06.09.2021



MESTRA[®]

Your trusted brand

Talleres Mestraitua S.L.

Txori-erri Etorbidea, 60
T: (+34)944530388 - F: (+34)944711725
mestra@mestra.es - www.mestra.es
48150 SONDIKA - BILBAO - ESPAÑA