


ARCO FACIAL  
**FACE BOW**  
ARC FACIAL  
**STANDARD**  
010102-50

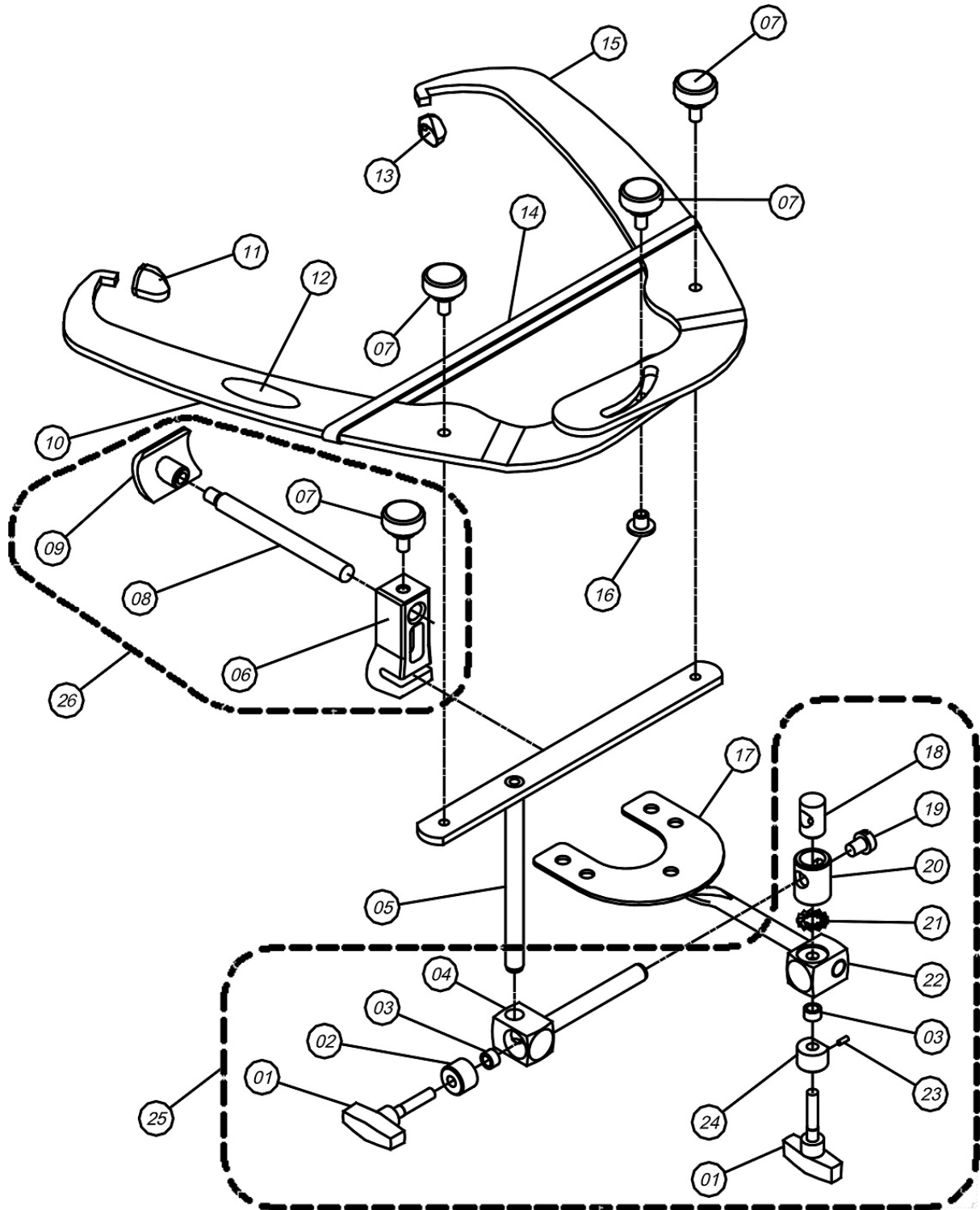

**ARCO FACIAL**  
**FACE BOW**  
*ARC FACIAL*  
**STANDARD**  
**010102-50**

Nº	Ref.	Descripción	Description
01	010102-501	Mariposa de la junción	Wing screw
02	010102-502	Fijador de la junción (sin agujero)	Piece to fix the cross bar (without hole)
03	010102-503	Anillo de la junción	Elastic washer
04	010102-504	Eje principal del arco	Horizontal slide bar
05	010102-505	Traba del arco	Cross bar
06	010102-506	Soporte de la pieza nasal	Nose piece support
07	010102-507	Tornillo de fijación del arco	Face-bow wing screw
08	010102-508	Asta de la pieza nasal	Nose piece shaft
09	010102-509	Bloque de la pieza nasal	Nose piece
10	010102-510	Arco derecho (con agujero)	Face-bow arm (right)
11	010102-511	Aurícula derecha	Ear piece (right)
12	-	Etiqueta de identificación del modelo	Model identification label
13	010102-513	Aurícula izquierda	Ear piece (left)
14	010102-514	Elástico natural	Elastic band
15	010102-515	Arco izquierdo (con rasgo)	Face-bow arm (left)
16	010102-516	Tuerca central del arco Standard	Center nut
17	010102-517	Tenedor para dentado	Bite fork
18	010102-518	Bloque interno del eje principal	Connection block (internal)
19	010102-519	Tornillo de final de curso	Stopping screw
20	010102-520	Bloque externo del eje principal	Connection block (external)
21	010102-521	Anillo dentado	Washer for the block
22	010102-522	Bloque de fijación del tenedor	Fork connection block
23	010102-523	Clavija fijadora de la junción	Affixing block pin
24	010102-524	Fijador de la junción del tenedor (com agujero)	Affixing block (with hole)
25	010102-525	Conjunto fijación del tenedor	Fork fix assembly
26	010102-526	Conjunto der relator nasal	Nose piece assembly