



MEZCLADORA DE ALGINATO

Ref. 080515



MEZCLADORA DE ALGINATO

Ref. 080515



Aunque piense que la elaboración de alginato es más rápida y sencilla mezclándolo a mano, podemos asegurarle que después de probar nuestras mezcladoras, no podrá prescindir de ellas.

Marcado CE: Producto sanitario Clase I
Según MDR (EU) 2017/745

Taza Ref. 080515-02

Espátula (12 u.) Ref. 060002

**UN PROCESO CÓMODO Y DE CALIDAD
EN MENOS DE 1 MINUTO.**

Especificaciones

Alto 230 mm (con taza)	Tensión 230 V 50/60 Hz.
Ancho 175 mm	Consumo 60 W
Fondo 250 mm	Peso 3 kg



1 Conecte la máquina a una toma de corriente de 230 V. 50/60 Hz. Pulse el interruptor general situado en la parte posterior de la máquina.



2 Sitúe la taza en el plato porta-tazas encajando en el eje vertical hasta el tope, taza y plato.



3 Gire la taza en el sentido de las agujas del reloj 1/5 de vuelta (aprox. 70°).



4 Asegúrese de que la unión entre plato y taza es firme, tirando de la taza hacia arriba.



5 Vierta en el interior de la taza las proporciones adecuadas de alginato y agua recomendadas por el fabricante del alginato.



6 Pulse la tecla de velocidad lenta (tortuga) al tiempo que realiza un prebatido de la mezcla con la espátula (suministrada junto con el aparato).



7 Finalizado el prebatido (unos pocos segundos), pulse el botón de velocidad rápida (liebre) y amase la mezcla presionándola con la espátula en posición casi plana por la pared interior de la taza.



8 Finalizado el mezclado (unos pocos segundos), recoja la mezcla de alginato depositada sobre la pared interior de la taza, desplazando el canto de la espátula desde el fondo al borde superior de la taza.



9 La mezcla de alginato ya se encuentra preparada para su utilización.



10 Dépositela en la cubeta.



En **MESTRA** estamos especializados en la fabricación y distribución de maquinaria y aparatología dental, somos una empresa española con sede en Bizkaia, actualmente exportamos a clientes de más de cincuenta países en los cinco continentes y contamos con más de mil referencias en nuestro catálogo.

Hemos mantenido una línea de expansión constante desde nuestra fundación en 1945, gracias a nuestras mejores cualidades: la alta calidad de nuestros productos que han merecido la certificación ISO 9001:2015 por TÜV Rheinland, una cercana y atenta relación con nuestros clientes, y una constante innovación técnica en el diseño de nuestros productos.

Nuestra filosofía de diseño se basa en tres pilares fundamentales: las necesidades de nuestros clientes, la observación de las técnicas empleadas en laboratorio dental y nuestros más de 77 años de experiencia aportando soluciones creativas y contemporáneas a los problemas cotidianos de los profesionales del sector.

¿Deseas realizar una visita virtual a nuestro centro de formación y exposición?

¡Contáctanos y te lo enseñamos!



Talleres Mestraitua SL
(+34) 944 530 388
info@mestra.es - www.mestra.es
48150 SONDIKA (Spain)

