



# MALAXEUR D'ALGINATE

Réf. 080515



# MALAXEUR D'ALGINATE

Réf. 080515



Connecter la machine à une prise de courant de 230 V. 50/60 Hz. Poussez l'interrupteur général situé dans la partie postérieure de la machine.

Marquage CE : Dispositif médical de classe I  
Selon MDR (EU) 2017/745

Tasse	Réf. 080515-02
Spatule (12 u.)	Réf. 060002

**LE CONFORT ET LA  
QUALITÉ EN MOINS D'UNE MINUTE**

## Caractéristiques

Hauteur 230 mm (tasse incluse)	Alimentation 230 V 50/60 Hz.
Largeur 175 mm	Consommation 60 W
Profondeur 250 mm	Poids 3 kg



Connecter la machine à une prise de courant de 230 V. 50/60 Hz. Pousser l'interrupteur général situé dans la partie postérieure de la machine.



Emboîter le bol sur le plateau sur l'axe vertical jusqu'au bout.



Tourner le bol dans le sens des aiguilles d'une montre 1/5 de tour (70° environ).



Assurez-vous du parfait accouplement du bol - plateau en tirant le bol ver le haut.



Verser à l'intérieur du bol les proportions eau-alginate préconisées par le fabricant d'alginate.




Pousser le bouton vitesse lente (tortue) et faites un pré mélange à l'aide de la spatule (fournie avec l'appareil).



Après quelques secondes, actionner le bouton vitesse rapide (lièvre) et pétrir le produit du mélange en l'écrasant contre la paroi du bol en maintenant la spatule en position quasiment parallèle à la paroi



Une fois le mélange effectué (quelques secondes), ramasser la pâte écrasée contre la paroi du bol en maintenant la spatule en position ouverte depuis le fond jusqu'au bord supérieur du bol.

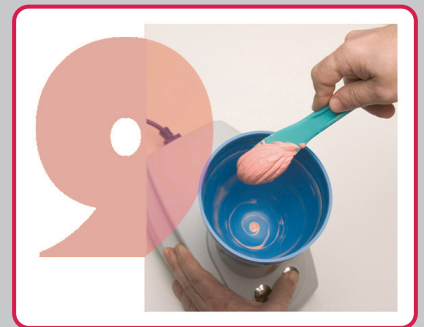

L'alginate est à présent prêt à être utilisé.



Vous pouvez à présent le placer dans le porte empreintes.





**MESTRA** est une entreprise basée dans le pays basque espagnol spécialisée dans la fabrication et la distribution de machines et d'appareils dentaires. Nous exportons actuellement vers des clients dans plus de cinquante pays sur cinq continents et nous avons plus de mille références dans notre catalogue.

Nous avons maintenu une ligne d'expansion constante depuis notre fondation en 1945. Forte du suivi et de la qualité de nos produits, l'entreprise est certifiée ISO 9001:2015 par le TÜV Rheinland. Nous entretenons une relation étroite et attentive avec nos clients et nous nous caractérisons par une innovation technique constante dans la conception de nos produits.

Notre philosophie de conception repose sur trois piliers fondamentaux: les besoins de nos clients, l'observation des techniques utilisées dans les laboratoires dentaires et nos 77 années d'expérience dans l'apport de solutions créatives et contemporaines aux problèmes quotidiens des professionnels du secteur.

**Vous souhaitez faire une  
visite virtuelle de notre  
centre de formation et  
d'exposition?**

**Contactez-nous et nous  
vous montrerons!**



Talleres Mestraitua SL  
(+34) 944 530 388  
info@mestra.es - www.mestra.es  
48150 SONDIKA (Spain)

