




Décanteur de poussières CICLÓN

Réf. 080535

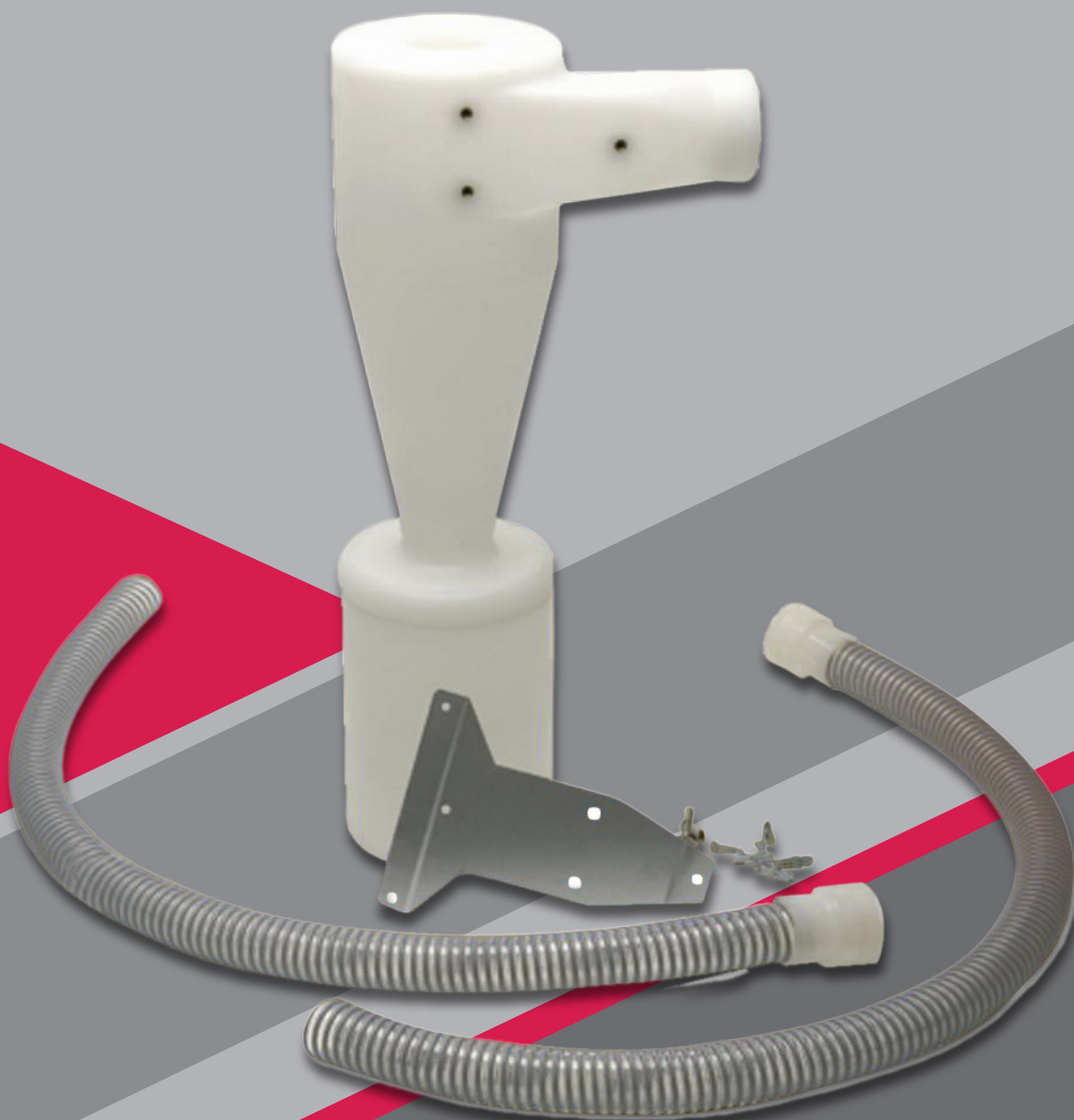

Décanteur de poussières CICLÓN

Réf. 080535



Voici le complément idéal pour tout type d'unité d'aspiration: le Décanteur de poussières **Ciclón MESTRA**. Celui-ci offre les possibilités suivantes:

- ✓ Préfiltrage d'une efficacité de 99%, permettant une économie considérable de filtres pour votre unité d'aspiration.
- ✓ Réduction de la perte de matière produite par l'obturation du filtre de l'unité d'aspiration. Avec le Décanteur de poussières **Ciclón** la saleté se dépose au fond de l'appareil et permet à tout moment la circulation de l'air sans obstructions.
- ✓ Réduction de la fatigue de l'unité d'aspiration. Le débit d'air ne diminue pas à mesure que se remplit le filtre ce qui permet de réduire l'effort du moteur, d'améliorer la réfrigération et donc la durée de vie de l'appareil.
- ✓ Dans le cas où l'on travaille avec des matières humides (plâtres, etc.) l'appareil évite l'obstruction du filtre.
- ✓ Récupération de la poussière aspirée de manière propre et simple. Cela est d'un grand intérêt lorsqu'on travaille avec des matières précieuses.

Caractéristiques

Hauteur 620 mm Poids 1,4 kg

Largeur 155 mm Capacité 3,5 L

Profondeur 300 mm

Installation et stockage



L'installation de l'appareil est très simple. Il suffit de le fixer à l'aide de vis à un mur ou un support. L'orientation du tuyau d'entrée peut se faire à droite ou à gauche. L'appareil est fourni avec tous les accessoires nécessaires à son montage: tuyaux de connexion; adaptateurs d'entrée; plaque support; vis de fixation.




Le Décanteur de poussières **Ciclón** est pourvu d'un réservoir de grande capacité (3,5 L.). La vidange et le nettoyage peuvent être réalisés rapidement grâce à son excellente accessibilité et à son système de fermeture facile.

Le fonctionnement

Le principe de fonctionnement du Décanteur de poussières **Ciclón** est ingénieux: l'air aspiré circule à l'intérieur de la machine et est pris dans un courant ascendant hélicoïdal.

Le propre poids des particules de poussière empêche celles-ci d'initier ce mouvement ascendant conduisant à l'aspirateur et les oblige à tomber et se déposer dans le réservoir.

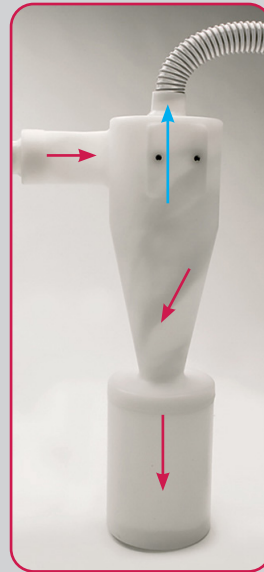

Les combinaisons

Le Décanteur de poussières **Ciclón** peut fonctionner avec différentes machines. De la simple cheville aspirante, jusqu'à l'appareil de sablage. Ses dimensions réduites et son design compact permettent de nombreuses possibilités de travail.





MESTRA est une entreprise basée dans le pays basque espagnol spécialisée dans la fabrication et la distribution de machines et d'appareils dentaires. Nous exportons actuellement vers des clients dans plus de cinquante pays sur cinq continents et nous avons plus de mille références dans notre catalogue.

Nous avons maintenu une ligne d'expansion constante depuis notre fondation en 1945. Forte du suivi et de la qualité de nos produits, l'entreprise est certifiée ISO 9001:2015 par le TÜV Rheinland. Nous entretenons une relation étroite et attentive avec nos clients et nous nous caractérisons par une innovation technique constante dans la conception de nos produits.

Notre philosophie de conception repose sur trois piliers fondamentaux: les besoins de nos clients, l'observation des techniques utilisées dans les laboratoires dentaires et nos 77 années d'expérience dans l'apport de solutions créatives et contemporaines aux problèmes quotidiens des professionnels du secteur.

**Vous souhaitez faire une
visite virtuelle de notre
centre de formation et
d'exposition?**

**Contactez-nous et nous
vous montrerons!**



MESTRA

Talleres Mestraitua SL
(+34) 944 530 388
info@mestra.es - www.mestra.es
48150 SONDIKA (Spain)



Système de
management
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 1100018003