



MESTRA

MÉLANGEUR AUTOMATIQUE D'ALGINATE

Réf. 100191



Mélangeur automatique d'alginate

Réf. 100191

La télécommande, le lave-vaisselle, les lève-vitres électriques entre autres, sont des inventions qui visent à nous rendre la vie de tous les jours plus facile. Il y a eu cependant des réticents à ces inventions: "Pourquoi aurais-je besoin d'une télécommande alors que ma télé est à peine à 2 mètres de mon fauteuil?... Ce n'est pas plus simple de laver la vaisselle à la main plutôt que de la placer dans une machine?... Je mets le même temps à baisser la vitre avec la manivelle plutôt qu'en appuyant sur un bouton..." Vous avez certainement entendu ce type de commentaires. Mais après avoir essayé tous ces dispositifs, qui peut s'en passer?

Même si vous croyez que l'élaboration de l'alginate est plus rapide et plus simple lorsque le mélange est manuel, laissez-nous vous convaincre, après avoir essayé notre mélangeur automatique que vous ne pourrez plus vous passer de lui, comme aujourd'hui vous ne pouvez plus vous passer de votre télécommande.

QUANTITÉ MAXIMALE: Eau + alginate = 80 grs.



Machine compacte aux dimensions réduites. Elle trouvera aisément sa place. Son design agréable contribuera à une intégration réussie dans votre cabinet dentaire.

Caractéristiques

Hauteur 305 mm	Poids 17 kg
Largeur 205 mm	Tension 230 V, 50/60 Hz
Profondeur 265 mm	Consommation 350 W



FONCTIONNEMENT TRÈS SIMPLE:

Il vous suffira de sélectionner le nombre de doses d'alginate que vous voulez réaliser et d'appuyer sur le bouton start. Un display vous indiquera le temps de mélange que vous aurez pré-défini. Rien de plus facile...



La machine est livrée avec 4 récipients, un doseur d'eau très pratique, un agitateur, une spatule et un support.

La préparation se réalise très rapidement:



- 1 Placer la proportion d'eau et d'alginate dans le récipient. Amorcer le mélange et fermer.



- 2 Introduire le récipient dans la machine.



- 3 Fermer le couvercle et actionner le bouton start.



- 4 En à peine 10 secondes vous obtiendrez un mélange parfait.



- * L'alginate se récupère facilement du récipient. Le nettoyage est rapide et simple.



MESTRA est une entreprise basée dans le pays basque espagnol spécialisée dans la fabrication et la distribution de machines et d'appareils dentaires. Nous exportons actuellement vers des clients dans plus de cinquante pays sur cinq continents et nous avons plus de mille références dans notre catalogue.

Nous avons maintenu une ligne d'expansion constante depuis notre fondation en 1945. Forte du suivi et de la qualité de nos produits, l'entreprise est certifiée ISO 9001:2015 par le TÜV Rheinland. Nous entretenons une relation étroite et attentive avec nos clients et nous nous caractérisons par une innovation technique constante dans la conception de nos produits.

Notre philosophie de conception repose sur trois piliers fondamentaux: les besoins de nos clients, l'observation des techniques utilisées dans les laboratoires dentaires et nos 77 années d'expérience dans l'apport de solutions créatives et contemporaines aux problèmes quotidiens des professionnels du secteur.

**Vous souhaitez faire une
visite virtuelle de notre
centre de formation et
d'exposition?**

**Contactez-nous et nous
vous montrerons!**



Talleres Mestraitua SL
(+34) 944 530 388
info@mestra.es - www.mestra.es
48150 SONDIKA (Spain)



Système de
management
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 1100018003